



Safe AQ max III  
เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด  
ที่ได้รับการอัปเดตใหม่  
สามารถทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด  
ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว  
ภายใน 5 วินาที

สำหรับร้านขายยา	สำหรับผู้ป่วยเบาหวานลูกค้าทั่วไป
1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Sliver & Carbon 16 สามารถป้องกันการรบกวนสูง อีกทั้งยังมีความแม่นยำขั้นสูงอีกด้วย	1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Sliver & Carbon 16 สามารถป้องกันการรบกวนสูง อีกทั้งยังมีความแม่นยำขั้นสูงอีกด้วย
2. มีช่วงระยะ HCT อย่างกว้างขวาง 10%~70% ทำให้สามารถใช้ได้ อย่างกว้างขวางมากขึ้น	2. ไม่มีการเข้ารหัสเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการ รับผลการทดสอบที่รวดเร็วภายใน 5 วินาที
3. มีข้อความเตือนหากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ/ มีตัวบ่งชี้กระแสไฟฟ้า/ ค่าเฉลี่ยต่อวัน: สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับโรคเบาหวานได้ ดีขึ้น	3. เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถใช้งานได้
4. ลดความเจ็บปวดจนแทบจะไม่มีรู้สึก - ด้วยอุปกรณ์ lancing รุ่นใหม่ ของ Sinodraw II	4. การทดสอบที่สมจริง เหมาะสำหรับนักเรียน/พนักงานออฟฟิศ
5. จอแสดงผลมาตรฐานอีกทั้งยังสนับสนุนในเรื่องของการทดสอบฟรี	5. มีข้อความเตือนหากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ/ มีตัวบ่งชี้กระแสไฟฟ้า/ ค่าเฉลี่ยต่อวัน: สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับโรคเบาหวาน ได้ดีขึ้น
6.บริการหลังการขายแบบเรียลไทม์และแปลเป็นภาษาท้องถิ่นตลอด 24 ชั่วโมง	6. ลดความเจ็บปวดจนแทบจะไม่มีรู้สึก - ด้วยอุปกรณ์ lancing รุ่นใหม่ของ Sinodraw II
	7. บริการหลังการขายแบบเรียลไทม์และแปลเป็นภาษาท้องถิ่นตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อความแสดงความผิดพลาด คำบรรยาย

LO	<p>ความหมาย: ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า 20 มก./ดล. (1.1 มม./ลิตร)</p> <p>การดำเนินการ: ใช้แถบทดสอบใหม่และทดสอบอีกครั้ง หากมิเตอร์ยังคงแสดง "LO" โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ</p>
HI	<p>ความหมาย: ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 600 mg/dL (33.3mmol/L)</p> <p>การดำเนินการ: ใช้แถบทดสอบใหม่และทดสอบอีกครั้ง หากมิเตอร์ยังคงแสดง "HI" โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ</p>
E-1	<p>ความหมาย: แบตเตอรี่ต่ำ ไม่สามารถทำการทดสอบได้</p> <p>การดำเนินการ: ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่</p>
E-2	<p>ความหมาย: การทำงานของมิเตอร์อยู่นอกช่วงอุณหภูมิ (5 °C - 45 °C)</p> <p>การดำเนินการ: ย้ายมิเตอร์และแถบทดสอบไปยังตำแหน่งอุณหภูมิที่เหมาะสม รออย่างน้อย 30 นาทีและทดสอบอีกครั้ง</p>
E-3	<p>ความหมาย: การดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การนำแถบทดสอบมาใช้งานอีกครั้ง</p> <p>การดำเนินการ: ใช้แถบทดสอบใหม่และทดสอบอีกครั้ง</p>
E-4	<p>ความหมาย: ข้อบกพร่องของรหัส</p> <p>การดำเนินการ: ใช้แถบทดสอบใหม่และทดสอบอีกครั้ง หากตัวเครื่องยังคงแสดง E-4 โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ +86-731-89935929</p>
E-5	<p>ความหมาย: ข้อผิดพลาดในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น แถบทดสอบถูกถอดออกระหว่างกระบวนการทดสอบ</p> <p>การดำเนินการ: ใช้แถบทดสอบใหม่และทดสอบอีกครั้ง</p>
E-6	<p>ความหมาย: ข้อผิดพลาดภายในของตัวเครื่อง</p> <p>การดำเนินการ: โทรหาฝ่ายบริการลูกค้าที่ +86-731-89935929</p>
E-7	<p>ความหมาย: ปริมาณของตัวอย่างเลือดไม่เพียงพอ</p> <p>การดำเนินการ: ใช้แถบทดสอบใหม่และทดสอบอีกครั้งด้วยปริมาณตัวอย่างเลือดที่เพียงพอ</p>
E-8	<p>ความหมาย: ข้อผิดพลาดของกระบวนการทดสอบ</p> <p>การดำเนินการ: ใช้แถบทดสอบใหม่และทดสอบอีกครั้ง</p>
E-0	<p>ความหมาย: ข้อผิดพลาดที่กู้คืนได้ของตัวเครื่อง ตัวอย่างเช่น ตัวเครื่องถูกรบกวนโดยสภาพแวดล้อม</p> <p>การดำเนินการ: ใส่แบตเตอรี่ในตัวเครื่องอีกครั้ง หากตัวเครื่องยังคงแสดงข้อความ E-0 โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ +86-731-89935929</p>